

Monitor spánku YH-600B Pro


rychlý návod k použití

1. Funkce tlačítek


①/✓	Tlačítko On-Off / OK : zapíná a vypíná přístroj, potvrzuje nastavení.
☺	Tlačítko Shift : přepíná obrazovky a možnosti.
①/✓+☺	Protože v menu neexistuje "Exit", stiskněte a držte tato 2 tlačítka současně (v obrazovce menu).

2. Nastavení přístroje


- 1 Noste přístroj na zápěstí (preferenčně na levém) jako hodinky, utáhněte pásek a posuňte přístroj do polohy, která je pro vás pohodlná.

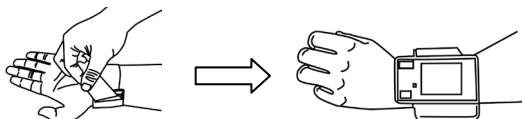


- 2 Noste a utáhněte si pásek na zápěstí a pás pro respirační kit na hrudníku. Vložte kabel do otvoru na dýchací soupravě a zavěste respirační sadu na hrudní pás.

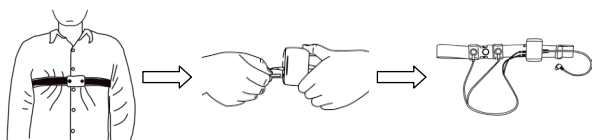


- 3 Dvě malé otevřené trubičky na kanyle pro proudění vzduchu si vložte do nosních dírek. Smyčku si otočte kolem uší a pak zpět kolem krku, aniž byste ji přetáhli přes hlavu. Umístěte kanylu do pohodlné polohy pod bradou a lepicí páskou ji zajistěte.

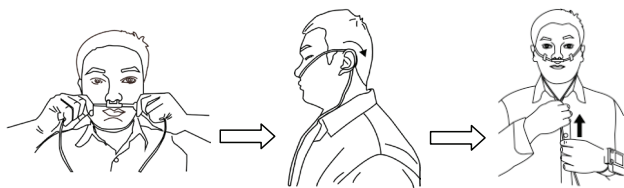

- 4 Namontujte kanylu pro proudění vzduchu do přípojek respiračního kitu otáčením ve směru hodinových ručiček a vložte datový konektor respiračního kitu do portu **Flow / COM** na pravé straně přístroje.

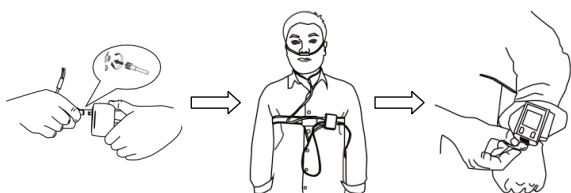

- 5 Senzor pulsního oximetru upevněte na ukazováček. Prst musí být v senzoru vložen nadoraz. Vložte datový konektor senzoru pulsního oximetru do portu **SpO₂** na horní části přístroje.

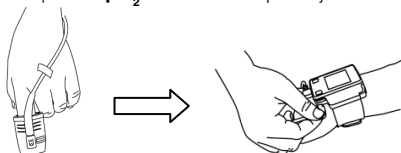


- 6 Následující obrázek ukazuje, jak to vypadá, když jsou připojeny všechny součásti přístroje.



3. Nahrávání

- 1 Zapněte přístroj stisknutím a podržením tlačítka **On-Off / OK** ①/✓ po dobu asi 5 sekund a vstupte do obrazovky nahrávání "Record".

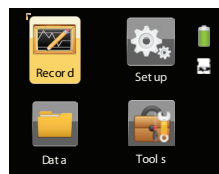


- 2 Pokud všechna přídatná zařízení jsou dobře připojena, zařízení je připraveno pro nahrávání. Potvrzení času (0:00:00) v levém horním rohu obrazovky bliká. Stiskněte a držte tlačítko **On-Off / OK** ①/✓ po dobu asi 2 sekund, čím zahájíte nahrávání.



- 3 Ukončete nahrávání současným stisknutím a podržením tlačítek **On-Off / OK** a **Shift** ①/✓+☺ po dobu asi 3 sekund. Přístroj vypnete stisknutím a podržením tlačítka **On-Off / OK** ①/✓ po dobu asi 5 sekund.

4. Analýza dat

V obrazovce "Data" může uživatel vidět nahraná data a podívat se na závažnost SAHS, jak je znázorněno níže.

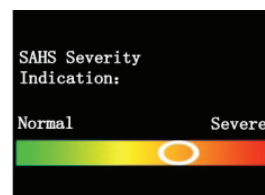

5. Operace v obrazovce Nástroje – "Tools"

Z obrazovky nástroje "Tools" mohou být data přenesena přes bluetooth a manuálně vymazána. V této obrazovce lze také zvolit komunikační jazyk.

6. Důležité tipy

Před použitím přístroje si přečtěte celý manuál a zapamatujte si všechny informace potřebné pro zajištění řádného použití přístroje.